

SCHEMA TECNICA

SCALDAFANGO (metodo d'uso)

1. Inserire il fango nell'apposita ciotola ed appoggiarla sulla caldaia del fornello scaldafango.
2. Inserire la presa di corrente.
3. Accendere l'interruttore verde posto sul frontale dell'apparecchio.
4. La spia luminosa accesa indica la fase di riscaldamento.
5. Un termostato interno regolerà la temperatura automaticamente.
6. Trascorsi 30' il fango avrà raggiunto la temperatura ideale (35/40° C).
7. Prelevare quindi la ciotola con il fango e procedere con il trattamento.
8. Spegnerne l'interruttore del fornello.

AVVERTENZE

1. Non lasciare la ciotola con il fango per troppo tempo sul fornello perché si seccerebbe completamente.

AVVERTENZE PER LA PULIZIA DEL FORNELLO

1. Staccare il fornello prima di fare la pulizia.
2. Pulire solo con una spugna appena umida.
3. Non utilizzare mai acqua per pulire il fornello.