
Contenuto dell'imballaggio



Controindicazioni:

Non utilizzare l'apparecchio con:

- Pazienti con pelle ipersensibile o con acne severa.
- Pazienti con diabete, ipertensione o colesterolo alto.
- Pazienti con un'infezione cutanea contagiosa.
- Pazienti con dispositivo di monitoraggio della frequenza cardiaca (pacemaker), defibrillatore automatico impiantabile (ICD) o qualsiasi altro dispositivo elettromagnetico impiantato.

Come avviarlo:

- Aprire l'imballaggio e verificare che tutte le parti dell'apparecchio siano presenti e siano in buone condizioni. È necessario conservare l'imballaggio per qualsiasi eventuale reclamo.
- Verificare che l'apparecchiatura sia in buone condizioni. Se ci dovesse essere qualche problema, contattare il proprio distributore.
- Collocare l'apparecchiatura in uno spazio pulito e ventilato con una temperatura compresa tra 5 e 40°. L'umidità relativa non può essere superiore all'80%. Non collocare nessun oggetto a meno di 5cm di distanza dall'apparecchio.
- Non collocare articoli sopra l'apparecchio.
- Collocare le bottiglie anteriori e posteriori. Nel caso in cui si desideri separare le bottiglie posteriori, sarà necessario svitarle. Per quanto riguarda quelle anteriori, bisognerà premere il pulsante superiore per poterle estrarre.
- Inserire il cavo nero nella presa di corrente ed accendere l'apparecchiatura.
- Pulire le bottiglie prima di riempirle con i prodotti di bellezza. Quando sarà necessario svuotarle per effettuare la pulizia dopo un trattamento, assicurarsi che l'apparecchiatura non sia accesa o in funzionamento, perché il prodotto potrebbe entrare

nell'apparecchiatura stessa e danneggiarne i componenti.

- Se l'apparecchiatura emette un segnale acustico quando è in azione, controllare l'indicatore sul monitor della bottiglia di scarico. Se la spia lampeggia, svuotare le bottiglie e reinserirle nuovamente dopo averle svuotate.

Riempire le bottiglie con i seguenti prodotti:

A: Liquido per la pulizia profonda

B: Liquido Idratante


C: Lozione disinfettante

D: Liquido ossigenante (bottiglia posteriore H2 O2)

IDRODERMOABRASIONE

Indicato per pulizie e trattamenti profondi per eliminare i punti neri, l'acne, lo sporco accumulato sulla pelle e la pelle grassa. Ideale anche dopo trattamenti di riduzione del grasso e per aumentare l'elasticità ed il tono della pelle.

1. Inserire il cavo nella presa laterale "abrasion". Posizionarlo in modo che la voce "open" si trovi sulla parte superiore del cavo.
2. Pulire il viso del paziente prima del trattamento.
3. Inserire la testina nel manipolo corrispondente, in base all'area che si desidera trattare.
4. Scegliere la bottiglia, in base al prodotto che si desidera utilizzare, posizionando la rotella centrale sulla lettera della bottiglia desiderata. Ad esempio, se si desidera applicare un trattamento ossigenante, posizionare la rotella centrale sulla lettera D.
5. Tra un trattamento e l'altro con i diversi prodotti, tenere la testina del manipolo premuta con il dito per 4-5 secondi, un paio di volte, per pulirla.

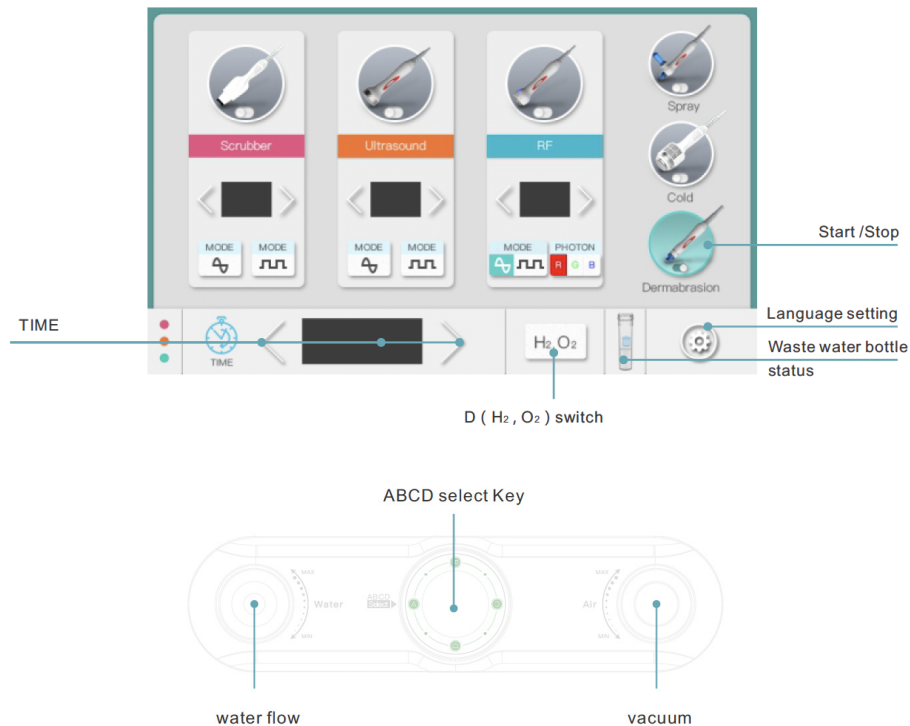

ULTRASUONI

6. Sostituire la testina e regolare l'intensità dell'aspirazione in base alla pelle del paziente e all'area che desidera trattare.

7. Premere il pulsante "H2 O2" e/o "Dermabrasion" sullo schermo a seconda del tipo di trattamento che si desidera eseguire, ed attendere 3 minuti prima di iniziare a spruzzare. La funzione scelta può anche essere attivata dal pulsante del manipolo.

8. Dopo il trattamento, pulire le bottiglie ABCD ed i tubi per evitare intasamenti.

1. Inserire il cavo nella presa laterale "ultrasound". Posizionarlo in modo che la voce "open" si trovi sulla parte superiore del cavo.

2. Pulire il viso del paziente prima del trattamento ed applicare il prodotto nella zona da trattare.

3. Impostare la durata del trattamento, regolare l'intensità da 1 a 10 tramite le frecce e scegliere il tipo di onda mediante il pulsante "MODE", tra: onda continua (pulsante sinistro) e onda pulsata (pulsante destro). Si consiglia di utilizzare il primo per trattamenti su pelli normali e tessuti più spessi, mentre il secondo è ideale per le aree più sensibili e sui tessuti più fini. Si consiglia di iniziare con l'onda continua ed aumentare gradualmente l'intensità.

4. Premere il pulsante "ultrasound" sullo schermo per iniziare il trattamento.

5. Muovere il manipolo facendo pressione leggermente sulla pelle dal basso verso l'alto lungo le linee di contorno per 5-8 min.

MARTELLLO FREDDO

Indicato dopo trattamenti di ringiovanimento della pelle, restringimento dei pori, eliminazione degli arrossamenti, riduzione della sensibilità e miglioramento del tono della pelle.

1. Inserire il cavo nella presa laterale "cold". Posizionarlo in modo che la voce "open" si trovi sulla parte superiore del cavo.
2. Pulire il viso del paziente prima del trattamento ed applicare gel nella zona da trattare.
3. Premere il pulsante "cold" sullo schermo.
4. Mettere il martello a contatto con la pelle del paziente nelle aree che si desidera trattare.

RADIOFREQUENZA

1. Inserire il cavo nella presa laterale "RF". Posizionarlo in modo che la voce "open" si trovi sulla parte superiore del cavo.
2. Pulire il viso del paziente prima del trattamento ed applicare il prodotto nella zona da trattare.
3. Impostare la durata del trattamento, regolare l'intensità da 1 a 10 tramite le frecce e scegliere il tipo di onda mediante il pulsante "MODE", tra: onda continua (pulsante sinistro) e onda pulsata (pulsante destro). Si consiglia di utilizzare il primo per trattamenti su pelli normali e tessuti più spessi, mentre il secondo è ideale per le aree più sensibili e sui tessuti più fini. Si consiglia di iniziare con l'onda continua ed aumentare gradualmente l'intensità.
4. Premere il pulsante "RF" sullo schermo per iniziare il trattamento.
5. Muovere il manipolo facendo pressione leggermente sulla pelle dal basso verso l'alto o realizzando piccoli cerchi lungo viso.
6. Si consiglia realizzare un trattamento di 10 – 15 minuti.

SPRAY

1. Inserire il cavo nella presa laterale "spray". Posizionarlo in modo che la voce "open" si trovi sulla parte superiore del cavo.
2. Pulire il viso del paziente prima del trattamento.
3. Inserire la lozione che si desidera spruzzare nel piccolo contenitore di plastica, che si adatta sotto pressione nel manipolo spray.
4. Premere il pulsante "spray" sullo schermo.
5. Dirigere il manipolo verso l'area da trattare ed iniziare a spruzzare la lozione.
6. Se in qualsiasi momento il beccuccio si ostruisce, pulire eventuali detriti che si sono accumulati con l'aiuto di un ago o un piccolo strumento.


PEELING AD ULTRASUONI

Elimina la pelle morta, combatte le cuticole in eccesso e migliora la consistenza della pelle.


MODALITÀ A: Peeling

1. Inserire il cavo nella presa laterale "scrubber". Posizionarlo in modo che la voce "open" si trovi sulla parte superiore del cavo.
2. Pulire il viso del paziente prima del trattamento ed asciugarlo bene. Applicare la lozione disincrostante nell'area destinata al trattamento.
3. Impostare la durata del trattamento, regolare l'intensità da 1 a 10 tramite le frecce e scegliere il tipo di onda mediante il pulsante "MODE", tra: onda continua (pulsante sinistro) e onda pulsata (pulsante destro). Si consiglia di utilizzare il primo per trattamenti su pelli normali e tessuti più spessi, mentre il secondo è ideale per le aree più sensibili e sui tessuti più fini. Si consiglia di iniziare con l'onda continua ed aumentare gradualmente l'intensità.
4. Premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti laterali della spatola e posizionarla inclinata di circa 45°, così come mostrato nell'immagine seguente.
5. La durata del trattamento è di circa 15-20 minuti.

MODE A

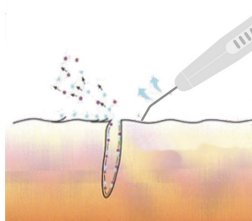

MODE B

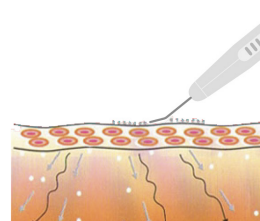

MODALITÀ B: Galvanico

1. Inserire il cavo nella presa laterale "scrubber". Posizionarlo in modo che la voce "open" si trovi sulla parte superiore del cavo.
2. Pulire il viso del paziente prima del trattamento ed asciugarlo bene. Applicare la lozione appropriata per la funzione galvanica sull'area che si desidera trattare.
3. Impostare la durata del trattamento, regolare l'intensità da 1 a 10 tramite le frecce e scegliere il tipo di onda mediante il pulsante "MODE", tra: onda continua (pulsante sinistro) e onda pulsata (pulsante destro). Si consiglia di iniziare con l'onda continua ed aumentare gradualmente l'intensità.
4. Tenere premuti i pulsanti laterali sulla spatola, premere saldamente la spatola contro la pelle e farla scorrere lungo le linee del viso, così come mostrato nell'immagine sopra.

PRECAUZIONI

- Within 24 hours of receiving the treatment, it is recommended to use sun protection cream. Consult your beautician about which other cosmetic products can be applied on your skin.
- Se il paziente soffre di anafilassi, acne severa, pelle ipersensibile o problemi di circolazione, si consiglia di consultare un medico specialista prima di utilizzare l'apparecchiatura.
- Se il paziente avverte fastidio alla pelle durante il trattamento, interrompere il trattamento.

MANUTENZIONE

- Durante la pulizia dell'apparecchiatura, assicurarsi che sia spenta.
- Utilizzare un panno pulito e asciutto per pulire l'apparecchiatura. È possibile utilizzare un panno leggermente umido per macchie o aree di sporco più estremo.
- Per pulire il manipolo di idrodermabrasione, iniziare selezionando la bottiglia C ed impostare l'intensità di aspirazione al massimo. Fare clic su "Avvia" e tenere il dito sulla testina per 5-10 secondi. Rimuovere la testina e ripetere il movimento 8-10 volte. Quando la bottiglia C è già pulita e vuota, riempire le bottiglie A e B con acqua tiepida e ripetere la stessa azione con queste due bottiglie, evitando così l'intasamento dei tubi e delle maniglie. Una volta terminato, rimuovere la testina e pulirla insieme alle altre con uno straccio per rimuovere i residui di sporco. È anche possibile immergerli in alcool o disinfettante per un minuto.
- Per pulire il manipolo spray, riempire il contenitore del manipolo con acqua tiepida, fare clic su "Avvia" e spruzzare tutta l'acqua tiepida.
- Tutti gli altri manipoli devono essere puliti con un panno umido con acqua calda dopo ogni utilizzo.

SCHEDA TECNICA

Pesi e dimensioni	Dimensioni imballo (cm)	43x45,5x31
	Peso lordo (kg)	9,5
	Dimensioni prodotto (cm)	26x40x38
	Schermo (pollici)	7"
Caratteristiche di lavoro	Freq. Ultrasuoni	1 MHz
	Freq. RF Bipolare	2 MHz
	Potenza di aspirazione	650 cm/hg
	Potenza del flusso d'acqua	30 l / h
	Pressione	90 Kpa
Caratteristiche elettriche	Tensione nominale	230 V
	Frequenza	50Hz/60Hz
	Potenza nominale	160 W